

Wat te doen bij Giardia?

- 1 Behandel jouw huisdier met een diergeneesmiddel gebaseerd op de werkzame stof Fenbendazol, zoals **No Worm Diacur**.
- 2 Was het huisdier en doe dit vooral goed rondom de anusstreek.
- 3 Was alle mandjes, dekentjes, etc. van je huisdier in de wasmachine, op minimaal 60 °C.
- 4 Giardia is een zeer besmettelijke infectie. Om een nieuwe (her)besmetting te voorkomen, is het belangrijk dat (nieuwe) ontlasting snel en grondig wordt opgeruimd.
- 5 **Giardia is ook besmettelijk voor mensen (zoönose).** Een goede hygiëne kan dit helpen te voorkomen. Was na aanraking van jouw huisdier altijd je handen. Zorg dat kinderen ook altijd hun handen wassen na het aaien of na het buitenspelen.

Giardia bestrijden

No Worm Diacur 500 & PetPaste bevatten de werkzame stof **Fenbendazol***. Naast Giardia pakken deze producten ook diverse wormsoorten aan.

No Worm Diacur PetPaste* is een pasta die je direct of vermengd door het voer kan toedienen.

No Worm Diacur 500* tabletten kun je direct in de bek toedienen. Je kunt ze ook verkruiden door het voer, of eerst oplossen in water.

Darmflora herstellen

Door Giardia wordt de darmwand van jouw huisdier flink aangetast. Om diarree te stoppen kun je jouw hond of kat **Sanimal Imodiarr** geven.

Daarna kun je de darmwand herstellen met **Sanimal Pre&Probiotica**.

No Worm & Sanimal zijn verkrijgbaar bij dierspecialisten!


*Geregistreerd voor honden behandeld met No Worm Diacur PetPaste. Lees vóór gebruik altijd eerst de bijsluiters. No Worm Diacur PetPaste 187,5 mg/g orale pasta REG NL 124053, No Worm Diacur 500 mg tablet REG NL 124018.



No Worm Diacur

Giardiatest bijsluiters

Wat is Giardia?

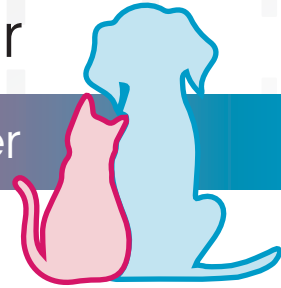

Giardia is een microscopisch kleine parasiet die in de dunne darm leeft en behoort tot de meest verspreide darmparasieten ter wereld. De darmwand wordt ernstig beschadigd, waardoor de opname en vertering van voedingsstoffen verslechtert.

Besmetting ontstaat meestal door:

- Het likken aan de poten nadat het dier buiten is geweest,
- Het drinken van besmet water,
- Te snuffelen aan besmette ontlasting.

Symptomen Giardia-infectie

In bijna alle gevallen krijgt je huisdier te maken met heftige en terugkerende diarree. Daarnaast kan je huisdier last krijgen van braken, vermoeidheid en een gebrek aan eetlust. Puppy's, kittens, zieke en oudere dieren kunnen hier ernstig ziek van worden.

Giardiatest


Met deze test kan worden aangetoond of er Giardia aanwezig is in de ontlasting van jouw hond of kat.

Inhoud van de testkit:

- 1x Antigeentest
- 1x Wattenstaafje
- 1x Testbuisje met vloeistof
- 1x Verzamelcontainer met schepje
- 1x Bijsluiters

Bewaaraadvies:

Een geopende testkit kun je bewaren bij een temperatuur van 15 tot 30 °C.

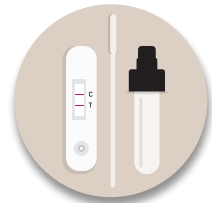

Voordat je gaat testen

Belangrijke zaken voordat je gaat testen:

- Deze test is voor eenmalig gebruik. Voor elke test moet een nieuwe antigeentest en een nieuw testbuisje worden gebruikt.
- Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen voor het testen.
- Antigeentesten mogen na de vervaldatum niet meer worden gebruikt.
- Na het openen van het aluminium zakje moet de antigeentest binnen het daaropvolgende uur gebruikt worden.
- Zorg ervoor dat je geen kattenbakvulling of andere grove deeltjes mee schept bij de ontlasting.
- Als de testlijn (T-gebied) zichtbaar is, is de test positief. Zelfs een zwakke testlijn moet worden geïnterpreteerd als een positief testresultaat.
- Houd je aan de aangegeven analysetijden.

LET OP! Het monstermateriaal kan besmet zijn met Giardia. Gooi na het testen alle materialen weg bij het restafval en desinfecteer het werkblad. Was na afloop je handen grondig.

Testresultaat

Positief

Het testresultaat is positief als zowel de testlijn (T-gebied) als de controlelijn (C-gebied) zichtbaar worden. Zelfs een zwakke testlijn moet worden geïnterpreteerd als een positief testresultaat. Dit betekent dat er op het moment van testen Giardia is gevonden in het monstermateriaal. Volg ons handige stappenplan om Giardia te bestrijden!

Giardia? Z.o.z. voor de behandeling & tips!

Negatief

Als alleen de controlelijn (C-gebied) zichtbaar is, is de test negatief. Dit betekent dat er op het moment van testen geen Giardia is gevonden in het monstermateriaal. Om Giardia echter helemaal uit te kunnen sluiten, adviseren wij een dag later nogmaals een Giardiatest uit te voeren.

Ongeldig

Er wordt geen controlelijn (C-gebied) zichtbaar. De test is ongeldig. Ook als de testlijn bruin verkleurt door de ontlasting, is de test ongeldig. Voer een nieuwe test uit.

Wijze van gebruik

Scan voor onze uitlegvideo!



1. Verzamel verse ontlasting in de verzamelcontainer (met bruine dop).



2. Roer met het wattenstaafje door de ontlasting in de verzamelcontainer (met bruine dop).



3. Draai de blauwe dop van het testbuisje af. Houd het wattenstaafje met de ontlasting in het testbuisje en het monstermateriaal al roerend op in de vloeistof.



4. Draai de blauwe dop weer terug op het testbuisje en schud circa 30 seconden.



5. Open de aluminium verpakking van de antigeentest en leg de test op een horizontaal oppervlak.



6. Breek het bovenste uiteinde van de blauwe dop van het testbuisje af.



7. Voeg 3 druppels uit het testbuisje toe aan de ronde uitsparing van de antigeentest.



8. Na 10 minuten kun je het testresultaat aflezen.